



Zdravotní testy na nejběžnější alergie pro domácí použití

Co Potřebujeme k provedení testu:



**1. testovací kazeta
bodnutí do prstu**



**2. sterilní jehla na
bodnutí**



3. trubička na náběr a přenos kapky krve



**3. lahvička s detekčním
vzorkem**

Provedení testu:

- 1. Vyberte prst, do kterého se píchnete(nejlepší prostředník, prsteník) lehce promasírujte bříško. Otočte a odeberte modré víčko z jehly a přiložte k promasírovanému bříšku prstu. Uchopte jehlu volnou rukou za bílou vroubkatou část a zatlačte proti prstu až uslyšíte cvaknutí. (jehla se pak zpět ukryje a nelze ji znovu použít)**

Dovozce do ČR: Eva Macháčková, Bratislavská 1517/2, Praha 15, IČ: 74331311

2. Prst držte nehtem nahoru a stále masírujte břicho volným palcem až se objeví velká kapka krve. Přiložte kapátko vodorovně ke kapce a nasávejte krev až k rysce.



3. Nakapejte kapku krve do otvoru v testovací kazetě dle obrázku:



4. Uchopte lahvičku s detekčním vzorkem a celý obsah vylíjte do velké prohlubně vedle umístění kapky krve. „Kazeta musí zůstat ve vodorovné poloze 15 minut, nehýbejte s kazetou“ .
5. Přesně po 15ti minutách uchopte testovací kazetu a držte ji stále ve vodorovné poloze. Vytáhněte modrý jezdec.



6. Odložte kazetu zpět na rovný povrch. Pokud máte vysokou hladinu IgE, uvidíte pozitivní výsledek již za 15 min. K potvrzení negativity je potřeba nechat test pracovat 30 min.